



極美機

iFeed SILENT ELECTRIC BREAST PUMP 超靜音電動吸乳器



SGS CERTIFIED | BPA FREE

iFeed極美機 超靜音電動吸乳器
手|電動 2 in 1
使用說明

使用需知	1
注意事項	1
警告事項	1
電動吸乳器	2
配件說明	2
材質名稱與耐熱溫度	2
配件清潔與消毒	3
組裝方式	3
電源連接方式	4
主機	5
螢幕顯示及按鍵說明	5
按鍵使用方式	5
開始吸乳	7
集乳之前的乳房清潔與按摩	7
哺乳媽媽的必需營養	7
哺乳媽媽應避免食用的食品	7
母乳儲存及回溫	8
配件選購	9
簡易故障排除	10

使用需知

注意事項

- 使用前請詳細閱讀本產品說明書。
- 使用前請清洗並消毒全部配件(不含吸乳器主機及雙邊轉接頭、矽膠管、變壓器、USB電源線，參考第3頁)
- 檢查吸乳器所有配件有無破裂或損壞，請勿自行拆解、修理或修改本產品主機。

⚠ 警告事項

- 假如發現電源線有缺口、損傷或插頭鬆脫時，請勿使用本產品。
- 請勿讓幼兒拉扯或玩耍電源線。不使用本產品時，應收起電源線並妥善收藏在幼兒接觸不到的地方。
- 主機弄濕時，應立刻拔除電源線，並把主機上水份拭乾。
- 除了使用時以外，請拔除電源線，並將此產品及所有配件放置於孩童無法接觸的地方。
- 連接電源線時，請確保沒有異物附著在電源插頭或連接器上，以免短路引致火災。
- 請定期以乾布拭去電源插頭上之灰塵，以免短路引致火災。
- 拔除電源線時，請勿拉扯電源線，應手持末端插頭並將電源拔除。
- 請勿在手沾有水份的情況下碰觸電源線、插頭或插座，以免觸電危險。
- 本吸乳器僅限使用Simba吸乳器所屬配件，請勿使用其他品牌的吸乳器配件，以免影響吸乳效果或造成主機損壞。
- 本產品附屬電源線只適用於本產品，不適用於其他電器產品。

使用操作
說明影片



電動吸乳器

配件說明



材質名稱與耐熱溫度

配件名稱	材質名稱	耐熱溫度
防塵蓋	PP 聚丙烯	-20°C ~ +100°C
吸乳喇叭罩		
吸力蓋		
吸力座		
雙邊轉接頭		
集乳瓶座		
寬口瓶蓋組		
矽膠軟墊	Silicone 矽膠	-20°C ~ +120°C
吸力杯		
防逆流鴨嘴裝置		
矽膠管		
寬口儲乳瓶密封矽膠墊片		
PPSU 寬口葫蘆小奶瓶 200ml	PPSU 聚亞苯基砜	-20°C ~ +197°C
超柔防脹氣奶嘴	Silicone 矽膠	-40°C ~ +150°C

配件清潔與消毒

清洗方式	以中性清潔劑清洗乾淨，以免殘留異味 ※建議使用小獅王辛巴綠活系奶瓶蔬果洗潔液
消毒方式	 水沸騰火消毒3-5分鐘  可蒸氣消毒  可紫外線消毒  不適合微波消毒 ※請確實用清水沖洗乾淨再進行消毒，以免殘留異味或造成配件受損

⚠ 注意事項

- 矽膠配件消毒後若有輕微霧化現象，為矽膠吸水特性，屬正常現象。
- 吸乳器配件可能因長時間使用、摩擦及消毒烘乾，產生變形或變色等無法避免之現象。當發生此狀況時，請立即更換新品。
- 除吸乳器主機及雙邊轉接頭、矽膠管、變壓器、USB電源線外，其他配件請清洗消毒。

組裝方式



單邊模式

[方法一]

將矽膠管插入電動主機氣閥，另一端接於吸力蓋氣閥



[方法二]

將雙邊轉接頭插入電動主機氣閥，插入矽膠管，轉接頭一端蓋緊，矽膠管另一端接於吸力蓋氣閥



雙邊模式

將雙邊轉接頭插入電動主機氣閥，矽膠管分別接於雙邊轉接頭兩端，矽膠管另一端分別接上二個吸力蓋氣閥



⚠ 注意事項

- 使用單邊/雙邊時，請先確認主機是否已設定正確吸乳模式，以免造成吸力不足或過強的狀況發生。
- 單邊模式：請搭配使用一組喇叭罩。（ 矽膠管直接插入吸乳器主機或使用雙邊轉接頭時請務必塞住接管另一端 ）
- 雙邊模式：請搭配使用二組喇叭罩。
- 使用USB電源線供電時，請務必確認供電裝置輸出的供電電壓及電流，電壓不足會造成吸乳器吸力不足，電壓過大會造成主機承受過度而損壞。
建議供電 / 電壓：5V - 6.5V、電流：1A - 2.1A
※建議供電範圍外可能無法供電或造成主機損壞。
- 在手濕的情況下，請勿插用變壓器或USB電源線，避免觸電可能。
- 吸乳器不使用時切勿將變壓器插置插座，請立即拔除，並妥善收藏，以免發生危險。
- 請在兒童無法觸及的環境下使用變壓器、USB電源線。



電源連接方式

1. 使用AC電源變壓器供電：

將AC電源變壓器的L型接頭插入主機的DC插孔，變壓器插座插入電源插座。

2. 使用USB行動電源供電：

將USB電源線L型DC圓柱接頭插入主機DC插孔，USB接頭插入行動電源接口。

(行動電源：5V / 2.1A)

主機

螢幕顯示及按鍵說明



按鍵使用方式

按鍵圖示	操作方式	功 能	螢幕顯示	注意事項
①	按壓3秒 切換	開機		全螢幕閃爍 ※閃爍完成，再執行下一個動作。 ⚠ 待機3分鐘後若無任何操作，即自動啓動省電裝置自動關機。
		關機		全螢幕熄滅 ※關機後微電腦即自動記憶最後吸力設定，下次使用可更快上手。
	按壓1秒 切換	啟動		全螢幕長亮
	按壓1秒 切換	暫停		吸力段數閃爍

按鍵圖示	操作方式	功 能	螢幕顯示	注意事項
M	按壓3秒 切換	單邊		單邊▶亮起 ※請搭配單邊吸乳器使用。
		雙邊		雙邊▶◀亮起 ※請搭配雙邊吸乳器使用。
	按壓1秒 切換	按摩		按摩滴~亮起 ※若選擇滴~按摩模式2分鐘後即自動切換成吸乳模式。
		吸乳		吸乳滴~亮起

⚠ 注意事項

- 本產品使用AC電源變壓器供電效果最佳。
- 在啓動吸乳器前請確認所有組件都確實組裝後再行啓動，以避免異物透過主機氣閥吸入主機，造成主機故障。
- 請確認單邊或雙邊吸乳模式，以免吸力過大過小造成疼痛不適感。
- 出國時使用，請攜帶該國轉換插頭，並注意該國電壓是否符合本變壓器之負荷。
- 本產品為LCD顯示面板，經衛生福利部國民健康署建議，使用過度恐傷害視力，請使用30分鐘休息10分鐘。

開始吸乳

集乳之前的乳房清潔與按摩

- 乾淨的棉球或毛巾，沾溫開水由乳頭中心往乳暈呈環形擦拭。
- 按摩乳房能刺激分泌乳汁及幫助乳汁順暢流出，同時還可配合下列按摩方式：



A. 環形按摩：
雙手置於乳房的上、下方，
以環形方向按摩整個乳房。

B. 螺旋形按摩：
一手托住乳房，另一手食指
和中指以螺旋形向乳頭方向
按摩。

C. 指壓式按摩：
雙手張開置於乳房兩側，由
乳房向乳頭擠壓。

操作注意事項

- 請確保乳房和吸乳器緊密貼合，以達到真空吸乳效果。
- 使用中若發出“砰”的空氣擠壓聲，即為喇叭罩和乳房沒有密合。
- 使用過程中，請依個人舒適度，選擇個人感覺最舒適的段數或按壓速度及力道，若過強可能會造成乳房不適，若過弱則會影響出乳效果。
- 若吸乳過程產生不適，請立即停止使用，並諮詢專業醫師。
- 集乳時請注意乳汁勿超過防逆流鴨嘴裝置逆閥，避免乳汁逆流、外漏。
- 使用時請勿將儲乳瓶傾斜放置或儲乳超過最大容量線刻度。
- 本吸乳器喇叭罩的螺牙是專為Simba寬口徑奶瓶所設計，請勿使用其他品牌奶瓶，避免乳汁外漏或是結合密合度不佳，導致儲乳瓶掉落。
- 若發生儲乳瓶傾倒時，請先關閉主機電源再扶正儲乳瓶。
- 請隨時將吸乳器直立放置，避免乳汁從排氣孔或喇叭罩滲漏的可能。
- 防逆流鴨嘴裝置的密合影響吸乳時的吸力，當發現鴨嘴裝置口有密合不良或是破損時，請更換新的鴨嘴裝置使用。

母乳儲存及回溫



奶瓶餵哺 / 集乳後鎖上奶嘴
蓋，可直接輕鬆餵哺寶寶



奶瓶儲存 / 奶瓶口放上矽膠
墊片，並以蝶牙蓋鎖緊，即可
儲存



母乳袋儲存 / 可倒入母乳保
鮮袋密封冰存

母乳餵餵專家建議 [母奶的儲存及回溫]

◎ 儲存時間

	剛擠出來的奶水	冷藏室內解凍的奶水	在冰箱外水溫解凍的奶水
室溫25°C以下	6-8小時	2-4小時	當餐使用
冷藏室0-4°C	5-8天	24小時	4小時
獨立的冷凍室	3個月	不可再冷凍	不可再冷凍
-20°C以下冷凍室	6-12個月	不可再冷凍	不可再冷凍

◎ 注意事項

1. 擠完奶後可在容器外標明日期時間，依日期排放便於掌握母奶的新鮮度。
2. 避免將收集好的母乳置於門邊，以免因經常開關而容易導致母奶變質。
3. 將擠出的乳汁直接放入奶瓶或母乳袋中，密封好並預留一些空間，以便使乳汁冷凍後有膨脹空間。
4. 於欲用冷凍母奶前，建議先放回冷藏室解凍至溫度。
5. 溫奶應用隔水加熱的方式，熱水不可超過60°C，勿用微波爐、電鍋。
6. 解凍後之母乳盡量即時飲用，不宜再次冷藏、解凍。

資料來源：新手媽媽-哺乳媽媽實用手冊

配件選購

電動吸乳器配件

	S9534-6 吸乳器 防逆流鴨嘴裝置		S9554-4 電動吸乳器 吸力蓋
	S9534-7 吸乳器 硅膠管		S9534-4 電動吸乳器 吸力杯
	S9535-5 吸乳器 硅膠軟墊		S9554-5 電動吸乳器 吸力座
	S9555-3 吸乳器 USB電源線		S9555-4 電動吸乳器 雙邊轉接頭
	S9555-2 吸乳器 變壓器		S9555-6 樂活哺乳收納保溫包
	S9554-1 吸乳器 吸乳喇叭罩		S6106 寬口儲乳瓶密封矽膠墊片

手動吸乳器配件

	S9521-1 手動吸乳器 吸力蓋		S9534-6 吸乳器 防逆流鴨嘴裝置
	S9521-2 手動吸乳器 吸力杯組(含中柱)		S9535-5 吸乳器 硅膠軟墊
	S9521-4 手動吸乳器 壓柄		S9554-1 吸乳器 吸乳喇叭罩
	S9521-5 手動吸乳器 吸力座		S6106 寬口儲乳瓶密封矽膠墊片

欲購買配件請洽客服專線886-4-26300333，或於本產品原購買門市預購。

電動吸乳轉換手動吸乳（手動配件可另行購買）

配件說明

- 1. 吸力蓋
- 2. 吸力杯
- 3. 中柱
- 4. 吸力座
- 5. 壓柄



電動吸乳轉換手動吸乳器組裝方式



簡易故障排除

問題	狀態	處理方法
吸力不足	使用時未確實貼合乳房	請調整使用方式，並確實貼合
	配件損耗、變形	請立即更換新品
	配件未確實組裝或設定錯誤	請依說明書組裝及設定方式重新操作
	矽膠管異常	請檢查矽膠管是否打結、彎折、破損
	奶量已超出奶瓶容量	請更換奶瓶再做使用
漏 奶	身體向後傾斜	
	使用時未確實貼合乳房	請調整使用方式，並確實貼合
緊急處理方法		使用本產品時若有異常現象，請立即關機與拔掉電源插頭，停止使用並通知本公司客服人員處理，切勿自行拆卸，以免發生危險。

限用物質含有情況表

限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

設備名稱：吸乳器 Equipment name		型號（型式）：S9554 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
DC接頭	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
矽膠組件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電子洩氣閥	○	○	○	○	○	○
電源線／內部配線	○	○	○	○	○	○
PCB電路板組	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

!警告事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非再對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嘻玩電器。

保證書

- 承蒙惠顧，謹致萬分謝意，為確保您的權利，請要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，始能享有本公司自購買日期起三年之免費保固。
- 消費者保護法第二十五條，企業經銷者對消費者，保證商品或服務品質時，應主動出具書面保證書，由經銷商售出者，填妥經銷商之名稱、地址、交易日期再交由顧客收執。

保固內容

- 免費服務期限：自購買日期起三年內在正常使用情況下有效，但屬人為的使用不當（如外力破壞、摔碰跌落、供電系統錯誤、自行拆卸…等）天災地變引起的故障損壞，不在免費服務範圍內。
- 在免費服務期滿後或免費服務範圍外的故障檢修更換零件，本公司將視故障情形酌收檢修零件費用。
- 網路購買者，必須有經銷商填妥購買日期並加蓋經銷商之店章。若為空白資料，一律以過保固期處理，酌收檢修費。
- 本保證書需由經銷商填妥購買日期及加蓋經銷商之店章，方始有效，遺失則不再補發。
- 故障商品送回原廠檢修時，請隨機台附上此保證書。無提供者則以製造號碼的生產年度首日計算，作為維修收費依據。

保證期間	保證對象	期間(自購買日期起)	經銷商
	S9554	3 年	地 址 :
購買日期	年	月	電 話 :
製造號碼			
		先生 / 小姐	
顧客資料	地 址 :		
	電 話 : ()		
			※請蓋店章・無經銷商店章視同無效

維修記錄

維修日期 :
處理情形 :

※產品保固僅限於台灣地區

極美、

Follow
us!



OFFICIAL



FACEBOOK



LINE

#小獅王辛巴



SONISON BABY PRODUCTS CO., LTD.

委製商名稱：美弗實業股份有限公司

委製商地址：台灣台中市沙鹿區六路里六路十四街64號1樓

委製商電話：886-4-26390955

客服中心：台灣台中市梧棲區中華路一段899號

顧客服務專線：886-4-26300333

網址：<http://www.simba.com.tw>

統一編號：84527295



R73496
RoHS

SIA9554-A(01)